

Vägledning vid förskrivning av tyngdtäcken

”Förskrivaren ska välja hjälpmedel ur det återlämnade sortimentet och därefter nya produkter ur det upphandlade sortimentet. Undantag får endast ske när det finns konkret funktionsmässig motivering.” – Utdrag från KHS ”Anvisning för förskrivning av tekniska hjälpmedel.”

Då begagnat sortiment eller upphandlat sortiment inte uppfyller brukarens behov, rekommenderas kontakt med hjälpmedelskonsulent.

Sortimentet av B-hjälpmedel skiljer sig mellan kommunerna i KHS samverkansområde. Sortimentsgruppen har därför valt att inte ha med det begagnade sortimentet av B-hjälpmedel i vägledningen.

Inledning

Från och med 1 oktober 2020 gäller ett nytt avtal på tyngdtäcken. I vägledningen hittar ni kortfattad information om varje produkt. För mer detaljerad information, hänvisar vi till Hjälpmedelstjänsten eller till respektive leverantörs hemsida.

Vår förhoppning är att den här vägledningen ska göra det lättare för er som förskrivare att hitta det hjälpmedel i avtalet som passar just er brukare.

Vägledningen gäller endast upphandlade produkter, alltså inte leverantörernas övriga produkter.

Leverantörer med avtal från och med 2020-10-01:

www.mondian.se

www.novista.se

[Länk till Hjälpmedelstjänsten hittar ni i Websesam.](#)

**Förenklad avtalsinformation: Länsupphandling tyngdtäcken
2020-10-01- 2022-09-30, med möjlighet till förlängning 2 år**

Avtalsnamn: Länsupphandling Tyngdtäcken

Avtalsnr: U-031-2020

Avtal har tecknats med nedanstående firmor:

www.mondian.se

www.novista.se

Hjälpmedel	Produkt	Leverantör
Tyngdtäcke med bollar eller likande	Kultäcket® Safir	Novista
Tyngdtäcke med kedjor, ringar eller liknande	Mondian tyngdtäcke med kedjor	Mondian
Tyngdtäcke med fiber	Fibertäcket Nova	Novista

Innehållsförteckning

Du kommer direkt till rätt sida i vägledningen genom att hålla ner Ctrl och klicka på produktnamnet;

1. [Kultäcket® Safir](#)
2. [Mondian Tyngdtäcke med kedjor](#)
3. [Fibertäcke Nova](#)

1. Kultäcket® Safir

Produktinformation

Kultäcket® Safir är ett tyngdtäcke som ger kroppen en taktil och proprioceptivt stimuli över hela kroppen. Vikten i Kultäcket® Safir utgörs av specialtillverkade, massiva, glaskulor med 25 mm i diameter. Glaskulorna är fastsydda på insidan av täcket och ger ett punktvis tryck som aktivt bidrar till en ökad kroppsuppfattning. Mått vuxenstorlek 150*200cm

Täcket är delbart i två med dragkedja

Tvättpåse samt bärväska för transport medföljer varje täcke.

Produkter

Kultäcket® Safir 6 kg, art nr 46448

Kultäcket® Safir 8 kg, art nr 46449

Kultäcket® Safir 10 kg, art nr45224

Kultäcket® Safir 12kg, art nr 46477



Tillbehör

Hygienöverdrag Ecoverde art nr 42094

Reservdelar

Bärväska art nr 42096

Tvättpåse art nr 46447

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

2. Mondian Tyngdtäcke med kedjor

Produktinformation

Tyngdtäcket består av ett antal längsgående kedjor som placerats i täcket genom kanaler. Täcken som väger över 6 kg är delbara och kan tvättas i maskin. Var bara uppmärksam på att maskinen klarar täckets vikt. Tyngdtäcket är tunt vadderat för att vara svalt. Önskas ett varmare täcke kombinerar man tyngdtäcket med sitt vanliga täcke i ett och samma påslakan. Mondian tyngdtäcke barn har måtten 105 x 130 cm. Mondian tyngdtäcke vuxen har måtten 150 x 200 cm.

För mer information, se nedanstående länk:

www.mondian.se

Produkter

Tyngdtäcke med kedjor 6 kg art nr 42085

Tyngdtäcke med kedjor 8 kg art nr 42086

Tyngdtäcke med kedjor 10 kg art nr 42087

Tyngdtäcke med kedjor 12 kg art nr 42088



Tillbehör

Hygienöverdrag art nr 42091

Reservdelar

Bärväska art nr 42093

Tvättpåse art nr 42092

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

3. Fibertäcke Nova

Produktinformation

Fibertäcke Nova är en särskild modell av fibertäcke utan vaddering. Täcket ger ett jämnt tryck över hela kroppen och kan delas på längden. Fibertäcket går att tvätta i vanlig maskin som klarar dess vikt och kan torktumlas. Fibertäcket finns i måtten 100x125 för barn och 150x200 cm för vuxna.

För mer information se nedanstående länk.

www.novista.se

Produkter

Fibertäcke Nova 6 kg art nr 42099
Fibertäcke Nova 8 kg art nr 42100
Fibertäcke Nova 10 kg art nr 42101
Fibertäcke Nova 12 kg art nr 42102



Tillbehör

Hygienöverdrag Ecoverde art 42094

Reservdel

Bärväska art 42096

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Deltagare i sortimentsgruppen (framtagande av kravspecifikation och utvärdering av inkomna anbud):

Anita Persson, Arbetsterapeut, Nybro kommun, även representant för Emmaboda och Torsås

Einar Ljungström, Arbetsterapeut, Kalmar kommun, även representant för Borgholm och Mörbylånga

Emma Fors Arbetsterapeut, Hultsfreds kommun, även representant för Vimmerby och Västervik

Jenny Blomqvist, Arbetsterapeut, Oskarshamns kommun, även representant för Högsby och Mönsterås

Anna Malmqvist, hjälpmedelskonsulent, KHS
Heida Haraldsdottir, Inköpare, KHS
Carina Nilsson, Upphandlare, Västerviks kommun