

Vägledning vid förskrivning av manuella rullstolar

Från och med 1 juni 2021 gäller ett nytt avtal på manuella rullstolar. I vägledningen hittar ni kortfattad information om varje produkt. För mer detaljerad information, hänvisar vi till Hjälpmedelstjänsten eller till respektive leverantörs hemsida.

Vår förhoppning är att den här vägledningen ska göra det lättare för er som förskrivare att hitta det hjälpmedel i avtalet som passar just er brukare.

”Förskrivaren ska välja hjälpmedel ur det återlämnade sortimentet och därefter nya produkter ur det upphandlade sortimentet. Undantag får endast ske när det finns konkret funktionsmässig motivering.” – Utdrag från Khs ”Anvisning för förskrivning av tekniska hjälpmedel”.

Då begagnat sortiment eller upphandlat sortiment inte uppfyller brukarens behov, rekommenderas kontakt med hjälpmedelskonsulent.

Vägledningen gäller endast upphandlade produkter och begagnat sortiment, alltså inte leverantörernas övriga produkter.

Leverantörer med avtal från och med 2021-06-01:

www.etac.se

www.invacare.se

www.panthera.se

www.sunrisemedical.se

[Länk till Hjälpmedelstjänsten hittar ni i webSESAM.](#)

Förenklad avtalsinformation:

**Manuella rullstolar - Länsupphandling, 2021-06-01- 2023-05-31,
med möjlighet till förlängning 2 år**

Avtalsnamn: Manuella rullstolar - Länsupphandling

Avtalsnr: U-129-2020

Avtal har tecknats med nedanstående firmor:

www.anatomicstitt.com

www.etac.se

www.heamedical.se

www.invacare.se

www.panthera.se

www.sunrisemedical.se

Hjälpmedel	Produkt	Leverantör
Transportrullstol	Transit	Etac
Allroundrullstol	Cross 6	Etac
Allroundrullstol XL	Cross 5 XL	Etac
Komfortrullstol	Azalea	Invacare
Aktivrullstol	Panthera S3 och S3 kort Panthera U3 Panthera S3 swing Küschall K-serie Quickie Nitrum Quickie xenon	Panthera Panthera Panthera Invacare Sunrise Medical Sunrise Medical
Höftbälte 2-punkts, standard		Hea medical
Höftbälte 2 punkts övriga		Anataomic Sitt Hea medical
Höftbälte 4-punkts, standard		Anatomic Sitt
Höftbälte 4-punkts, övriga		Anatomic Sitt Hea Medical

Innehållsförteckning

Du kommer direkt till rätt sida i vägledningen genom att hålla ner Ctrl och klicka på produktnamnet;

1. [Transportrullstol, Transit från Etac](#)
2. [Allroundrullstol, Cross 6 från Etac](#)
3. [Allroundrullstol XL, Cross 5 XL från Etac](#)
4. [Komfortrullstol, Azalea från Invacare](#)
5. [Höftbälten, från Hea Medical och Anatomic Sitt](#)
6. [Aktivrullstolar](#)
7. [Deltagare i sortimentsgruppen](#)

Transportrullstol

Målgrupp:

Patienter med funktionsnedsättning som medför nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå längre sträcka. Patienten har ingen betydande sittproblematik.

Användningstid

Rullstolen används kortare stunder upp till några timmar.

Användningsområde

Rullstolen används både inom- och utomhus i olika miljöer och på varierande underlag. Tas ofta med i bil eller med färdtjänst.

Begagnat sortiment

Transit och M100 TR, Etac
Spirea 4 NG, Invacare

Avtalat sortiment

Produktnamn: Transit
Leverantör: Etac



Sittbredd:	35, 40, 45, 50 cm
Transportbredd:	25 cm
Totalbredd:	Sittbredd + 15cm
Sitthöjd fram:	50 cm
Vikt sittbredd 45cm:	17kg
Max brukarvikt:	135kg

Standardutförande

Transportrullstol med 16" vårdarbromsande hjul, sits, rygg, höjreglerbara och avtagbara armstöd, vinkelfasta benstöd med fotplattor, höj- och sänkbara körhandtag, tippskydd och tramprör.

Upphandlade tillbehör

Vinkelställbara benstöd

Benämning	Art nr webSESAM
Rullstol Transit transport sb 35	32409
Rullstol Transit transport sb 40	32410
Rullstol Transit transport sb 45	32411
Rullstol Transit transport sb 50	32412

Vanliga tillbehör	Artikelnummer webSESAM
Benstödsöverdel vsb modell 3 inkl vadplatta	32422
Ersätts successivt av nedanstående artiklar	
Benstödsöverdel vrb modell 3 inkl vadplatta sb 35-37,5	46996
Benstödsöverdel vrb modell 3 inkl vadplatta sb 40-42,5	46997
Benstödsöverdel vrb modell 3 inkl vadplatta sb 45-47,5	46998
Benstödsöverdel vrb modell 3 inkl vadplatta sb 50-60	46999

Vid förskrivning i webSESAM ersätts upphandlad produkt av likvärdig produkt som finns i lager på Khs. Ingen kontakt tas med förskrivare vid ersättning.

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Allroundrullstol

Målgrupp:

Patienter med funktionsnedsättning som medför nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå.

Patienten har behov av positionering i sittande. Patienten gör självständiga överflyttningar alternativt med hjälp av annan person eller lyft. I de flesta fall är det patienten som framför stolen.

Användningstid

Rullstolen används kortare stunder upp till större delen av dagen.

Användningsområde

Rullstolen används både inom- och utomhus i olika miljöer och på varierande underlag. Tas ofta med i bil eller med färdtjänst.

Begagnat sortiment

Cross 5, Cross 5 (2017)

Avtalat sortiment

Produktnamn: Cross 6

Leverantör: Etac



Sittbredd:	35; 37,5; 40; 42,5; 45; 47,5 cm
Sittdjup standard	36-49 cm
Sittdjup lång	42-55 cm
Transportbredd:	32 cm
Totalbredd:	Sittbredd + 20,5 cm
Sitthöjd Fram	36-56,5 cm,
Sitthöjd Bak	36-53 cm
	Sitthöjd 32-36 kräver 4" länkhjul , och sänker max brukarvikt till 100 kg
Rygghöjd	32-45cm
Vikt sittbredd 45cm:	15,1 kg
Max brukarvikt:	135 kg

Standardutförande

Rullstol med 20", 22" eller 24" drivhjul med quickrelease och punkteringsfria däck, länkhjul, brukarmanövrerad broms, sits, sitsförlängare, reglerbar ryggklädsel, benstöd med fotplattor, höjdregerbara armstöd med sidoskydd, bakomliggande körhandtag och tippskydd.

Vid förskrivning i webSESAM av ovanstående rullstol kan förslag ges på likvärdig ersättningsprodukt som finns i lager på Khs.

Artikelnummer webSESAM

Benämning	Artikelnummer webSESAM
Cross 6 sb 35 standard	46946
Cross 6 sb 35 lång	46947
Cross 6 sb 37,5 standard	46948
Cross 6 sb 37,5 lång	46949
Cross 6 sb 40 standard	46950
Cross 6 sb 40 lång	46951
Cross 6 sb 42,5 standard	46952
Cross 6 sb 42,5 lång	46953
Cross 6 sb 45 standard	46954
Cross 6 sb 45 lång	46955
Cross 6 sb 47,5 standard	46956
Cross 6 sb 47,5 lång	46957

Upphandlade tillbehör	Artikelnummer webSESAM
Amputationsbenstöd	36346
Armstöd lång höger	30982
Armstöd lång vänster	30983
Armstödspolstring, kort	31054
Armstödspolstring, lång	31055
Armstöd hemi hö	31687
Armstöd hemi vä	31688
Benstödsöverdel vsb modell 3 inkl vadplatta, äldre modell	32422
Ersätts successivt av nedanstående artiklar	
Benstödsöverdel vrb modell 3 inkl vadplatta sb 35-37,5	46996
Benstödsöverdel vrb modell 3 inkl vadplatta sb 40-42,5	46997
Benstödsöverdel vrb modell 3 inkl vadplatta sb 45-47,5	46998
Benstödsöverdel vrb modell 3 inkl vadplatta sb 50-60	46999
Broms förlängd höger	37430
Broms förlängd vänster	37431
Bålstöd finns upphandlade i många olika modeller och storlekar, se etacs hemsida eller kontakta konsulent för råd	
Ekerskydd 24"	31101
Ekerskydd 22"	31008

Ekerskydd 20"	31007
Enhandsbroms höger	35251
Enhandsbroms vänster	34763
Enarmsdrift 24"	32952
Enarmsdrift 22"	33153
Enarmsdrift 20"	33485
Gipsbenstöd	35622
Huvudstöd	44031
Huvudstödfäste sb 35	44078
Huvudstödfäste sb 37,5	44081
Huvudstödfäste sb 40	43621
Huvudstödfäste sb 42,5	42912
Huvudstödfäste sb 45	42913
Huvudstödfäste sb 47,5	43654
Hälband	30906
Kryckkäpphållare	34298
Körbygel, vsb till sb 37,5	47012
Körbygel, vsb till sb 40	47013
Körbygel, vsb till sb 42,5	47014
Körbygel, vsb till sb 45	45810
Körbygel, vsb till sb 47,5	47016
Ryggkil 15 cm	37926
Ryggkil 30 cm	37927
Sidodyna höger	42894
Sidodyna vänster	42906
Vadband 35-37,5	31009
Vadband 40-42,5	31010
Vadband 45-47,5	30907
Vårdarbromspaket, drivhjul i rätt storlek kompletteras av KHS	35912

Fästbeslag höftbälte Anatomic Sitt	Artikelnummer webSESAM
2-punktsbälte	47017 + 47022*2 + 2 st M6*25 skruvar
4-punktsbälte	47018*2 + 47022*2 + 2 st 47681 + 4 st M6*25 skruvar

Fästbeslag höftbälte Hea medical	Artikelnummer webSESAM
2-punktsbälte	47680
4-punktsbälte	47680 + 47684

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Allroundrullstol XL

Målgrupp:

Patienter med funktionsnedsättning som medför nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå.

Patienterna har behov av positionering i sittande. Patienten gör självständiga överflyttningar alternativt med hjälp av annan person eller lyft. I de flesta fall är det patienten som framför stolen. Patienten har en vikt över 125 kg.

Användningstid

Rullstolen används kortare stunder upp till större delen av dagen.

Användningsområde

Rullstolen används både inom- och utomhus i olika miljöer och på varierande underlag. Tas ofta med i bil eller med färdtjänst.

Begagnat sortiment

Cross 5 XL

Avtalat sortiment

Produktnamn: Cross 5 XL (2017)

Leverantör: Etac



Sittbredd:	50; 52,5; 55; 57,5; 60 cm
Transportbredd:	32 cm
Totalbredd:	Sittbredd + 21cm
Sitthöjd fram:	40-56,5 cm
Vikt sittbredd 50 cm:	16,3 kg
Max brukarvikt:	160 kg

Standardutförande

Rullstol med 22" och 24" drivhjul med quickrelease och punkteringsfria däck, länkhjul, brukarmanövrerad broms, sits, reglerbar ryggklädsel, benstöd med fotplattor, höjdregerbara armstöd med sidoskydd, bakomliggande körhandtag och tippskydd.

Vid förskrivning i webSESAM av ovanstående rullstol kan förslag ges på likvärdig ersättningsprodukt som finns i lager på Khs.

Artikelnummer webSESAM

Benämning	Artikelnummer web- SESAM
Cross 5 XL sb 50 standard (sittdjup 36-49)	43037
Lång (sittdjup 42-54)	43038
Cross 5 XL sb 52,5 standard (sittdjup 36-49)	43039
Lång (sittdjup 42-54)	43040
Cross 5 XL sb 55 standard (sittdjup 36-49)	43041
Lång (sittdjup 42-54)	43042
Cross 5 XL sb 57,5 standard (sittdjup 36-49)	43043
Lång (sittdjup 42-54)	43044
Cross 5 XL sb 60 standard (sittdjup 36-49)	43045
Lång (sittdjup 42-54)	43046

Upphandlade tillbehör	Artikelnummer web- SESAM
Amputationsbenstöd, höger	32667
Amputationsbenstöd, vänster	32668
Armstödspolstring, kort	31054
Armstödspolstring, lång	31055
Benstödsöverdel vsb modell 3 inkl vadplatta, äldre modell	32422
Ersätts successivt av nedanstående artikel	
Benstödsöverdel vrb modell 3 inkl vadplatta sb 50-60, ny modell	46999
Broms förlängd höger	37430
Broms förlängd vänster	37431
Bälstöd finns upphandlade i många olika modeller och storlekar, se etacs hemsida eller kontakta konsulent för råd	
Ekerskydd 24"	31101
Ekerskydd 22"	31008
Ekerskydd 20"	31007
Enhandsbroms höger	35251
Enhandsbroms vänster	34763
Enarmsdrift 24"	32952
Enarmsdrift 22"	33153
Enarmsdrift 20"	33485
Gipsbenstöd	35622
Huvudstöd	44031
Huvudstödsfäste sb 50	44056

Huvudstödsfäste sb 52,5	45140
Huvudstödsfäste sb 55	45141
Huvudstödsfäste sb 57,5	45142
Huvudstödsfäste sb 60	45143
Hälband	30906
Kryckkäpphållare	34298
Vadband sb 50-52,5	32465
Vadband sb 55-57,5	33330
Vårdarbromspaket, drivhjul i rätt storlek kompletteras av KHS	39751

Fästbeslag höftbälte Anatomic Sitt	Artikelnummer web- SESAM
2-punktsbälte	47017
4-punktsbälte	47018*2 + 47681

Fästbeslag höftbälte Hea medical	Artikelnummer webSESAM
2-punktsbälte Small	37679
2-punktsbälte Medium	36616
2-punktsbälte Large	37680
4-punktsbälte Small	37679 + 47019
4-punktsbälte Medium	36616 + 47019
4-punktsbälte Large	37680 + 47019

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Komfortrollstol

Beskrivning patientgrupp:

Patienter med funktionsnedsättning som medför nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå och svårighet att bibehålla sin kroppsställning i sittande. Rullstolen används av patienter med behov av positionering och lägesförändringar. Patienten gör överflyttning med hjälp av annan person eller lyft. Rullstolen framförs av patienter och/eller av assisterande person.

Användningstid

Rullstolen används från några timmar upp till hela dagen.

Användningsområde

Rullstolen används både inom- och utomhus i olika miljöer och varierande underlag. Ska kunna transporteras med färdtjänst.

Begagnat sortiment

HD Balance

Azalea

Avtalat sortiment

Produktnamn: Rea Azalea 2019

Leverantör: Invacare



Sittbredd:	39, 44 och 49 cm
Totalbredd	Sittbredd +22 cm
Sitthöjd fram:	45 cm
Tilt:	-1 grad -25 grader
Ryggfällning:	0-30 grader
Vikt sittbredd 45cm:	34 kg
Max brukarvikt:	135kg

Standardutförande

Tiltbar komfortrullstol med 24" drivhjul med punkteringsfria däck och plastade drivringar, länkhjul, brukarbröms, vårdarmanövrerad färd- och parkeringsbröms, plansits, ställbart ryggstöd med reglerbar ryggklädsel och ryggdyna, armstöd, vinkelställbara benstöd inklusive vad- och fotplatta, vsb körbygel/körhandtag, tippskydd och tramprör.

Tiltbar komfortrullstol med 16" vårdarbrömsade drivhjul, länkhjul, plansits, ställbart ryggstöd med reglerbar klädsel och ryggdyna, armstöd, vinkelställbara benstöd inklusive vad- och fotplatta, vsb körbygel/körhandtag, tippskydd och tramprör.

Vid förskrivning i webSESAM av ovanstående rullstol kan förslag ges på likvärdig ersättningsprodukt som finns i lager på Khs.

Artikelnummer webSESAM

Benämning	Artikelnummer webSESAM
Rullstol Azalea 24" sb 39 2019	45204
Rullstol Azalea Transport 16" sb 39 2019	45263
Rullstol Azalea 24" sb 44 2019	45205
Rullstol Azalea Transport 16" sb 44 2019	45266
Rullstol Azalea 24" sb 49 2019	45206
Rullstol Azalea Transport 16" sb 49 2019	45267

Upphandlade tillbehör	Artikelnummer webSESAM
Amputationsbenstöd höger	38338
vänster	38310
Bord sittbredd 39	37248
sittbredd 44	39146
sittbredd 49	39993
Bälstöd Azalea Multi vä/hö	39380
Azalea Multi swing-away hö	37866
Azalea Multi swing-away vä	37865
Dyna sidoskydd hö	45051
sidoskydd vä	45050
Utfyllnadsdyna vä/hö	37782
Ekerskydd 24"	30956
22"	37325
Nackstöd	36819
Ryggkil	37333
Vadmatta	37916
Vinkelfasta benstöd 80 grader	37888
Vinkelfasta benstöd 90 grader	42634

Fästbeslag höftbälte Anatomic Sitt	Artikelnummer webSESAM
2-punktsbälte	39367
4-punktsbälte	39367 + befintligt fäste som ingår i stolen

Fästbeslag höftbälte Hea medical	Artikelnummer webSESAM
2-punktsbälte Small	47020 eller befintlig fäste i stolen

2-punktsbälte medium	41609 eller befintlig fäste i stolen
2-punktsbälte Large	41225 eller befintlig fäste i stolen
4-punktsbälte Small	47020 + 39367(Bältesinfästning Azalea framför armstöd)
4-punktsbälte Medium	41609 + 39367(Bältesinfästning Azalea framför armstöd)
4-punktsbälte Large	41225 + 39367(Bältesinfästning Azalea framför armstöd)

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Höftbälten

Målgrupp

Patienter som använder rullstol och har stora svårigheter att bibehålla kroppsställning i sittande. Patienter som använder rullstol där bälte kan förebygga fall.

Kriterier

Funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att bibehålla kroppsställning sittande i rullstol eller vid egen förflyttning med rullstol. Patienter som använder rullstol och har behov av bälte för att förhindra fall ur rullstol vid transport. Funktionsnedsättning som medför begränsning i att bedöma sin förmåga att gå och behov finns att hindra patienten att resa sig, men där patienten samtycker till åtgärden.

Användningstid

Från några timmar upp till all vaken tid

Användningsområde

Bältet ska kunna fästas på olika modeller av rullstolar.

Avtalat sortiment


I avtalet ingår ett standardbälte med 2 fästpunkter och ett standardbälte med 4 fästpunkter, när det inte fungerar med standard finns flera modeller från respektive leverantör att välja mellan, kontakta hjälpmedelskonsulent om du behöver hjälp att välja rätt bälte till din patient.

Avropsordning när du väljer ett höftbälte ur det övriga sortimentet

1 - Brukarens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning utifrån sin profession och identifierar den/de höftbälten som uppfyller brukarens behov. Om mer än ett höftbälte uppfyller brukarens behov tittar förskrivaren på

2 - Lägsta pris

2-punktsbälte, standard

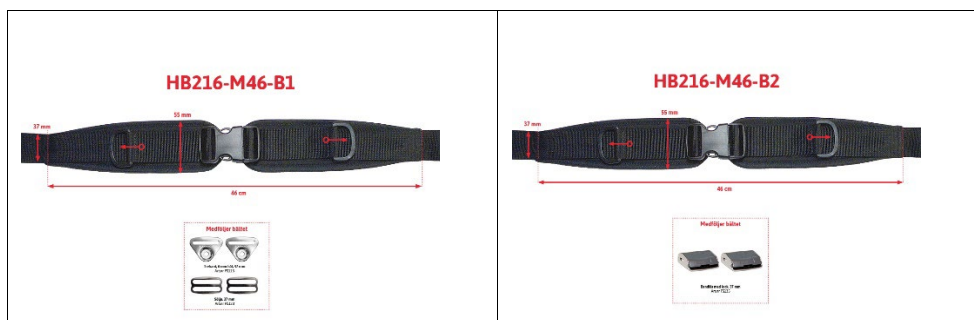

Artikelnummer webSESAM

Benämning	Art nr webSESAM
Höftbälte 2-punkt, Dynlängd 32cm åtdrag två från mitten, fixspänne ändbeslag Trekant och sölja	43128
Höftbälte 2-punkt, Dynlängd 32cm åtdrag två från mitten, fixspänne ändbeslag bandlås	47383
Höftbälte 2-punkt, Dynlängd 36cm åtdrag två från mitten, fixspänne ändbeslag Trekant och sölja	47380
Höftbälte 2-punkt, Dynlängd 36cm åtdrag två från mitten, fixspänne ändbeslag bandlås	47381
Höftbälte 2-punkt, Dynlängd 38cm åtdrag två från mitten, fixspänne ändbeslag Trekant och sölja	47384
Höftbälte 2-punkt, Dynlängd 38cm åtdrag två från mitten, fixspänne ändbeslag bandlås	47385
Höftbälte 2-punkt, Dynlängd 46cm åtdrag två från mitten, fixspänne ändbeslag Trekant och sölja	32261
Höftbälte 2-punkt, Dynlängd 46cm åtdrag två från mitten, fixspänne ändbeslag bandlås	47382
Höftbälte 2-punkt, Dynlängd 62cm åtdrag två från mitten, Fixspänne ändbeslag Trekant och sölja	47378
Höftbälte 2-punkt, Dynlängd 62cm åtdrag två från mitten, fixspänne ändbeslag bandlås	47379

2-punktsbälte, övriga

Om inte standardbältet fungerar har vi många olika varianter upphandlande från både Hea Medical och Anatomic Sitt, kontakta hjälpmedelskonsulent om du behöver hjälp att välja rätt bälte till din patient

4-punktsbälte, standard



Artikelnummer webSESAM

Benämning	Art nr webSESAM
Sittbelt Pro stl S, DWSR 25	44869
Sittbelt Pro stl M, DWSR 40	39982
Sittbelt Pro stl. L, DWSR 40	39981
Sittbelt Pro stl. XL, DWSR 40	46584

4-punktsbälte, övriga

Om inte standardbältet fungerar har vi många olika varianter upphandlade från både Hea Medical och Anatomic Sitt, kontakta hjälpmedelskonsulent om du behöver hjälp att välja rätt bälte till din patient

Fästbeslag 2-punktsbälte

Fästbeslag höftbälte Anatomic Sitt	Artikelnummer webSESAM
Cross 5 2-punktsbälte	47017
Cross 6 2-punktsbälte	47017 + 47022*2 + 2 st M6 *25 skruvar
Azalea 2-punktsbälte	39367 eller befintligt fäste som in- går i stolen

Fästbeslag 2-punkts höftbälte Hea medical	Artikelnummer webSESAM
Cross 5, Cross 5 XL 2-punktsbälte Small	37679
2-punktsbälte Medium	36616
2-punktsbälte Large	37680
Cross 6 2-punktsbälte	47680
Azalea 2-punktsbälte Small	47020 eller befintlig fäste i stolen
2-punktsbälte medium	41609 eller befintlig fäste i stolen
2-punktsbälte Large	41225 eller befintlig fäste i stolen

Fästbeslag 4-punktsbälte

Fästbeslag höftbälte Anatomic Sitt	Artikelnummer webSESAM
Cross 5, Cross 5 XL 4-punktsbälte	47018*2
Cross 6 4-punktsbälte	47018*2 + 47022*2 + 47681*2+ 4 st M6*25 skruvar
Azalea 4-punktsbälte	39367 + befintligt fäste som ingår i stolen

Fästbeslag höftbälte Hea medical	Artikelnummer webSESAM
Cross 5, Cross 5 XL 4-punktsbälte Small	37679 + 47019
4-punktsbälte Medium	36616 + 47019
4-punktsbälte Large	37680 + 47019
Cross 6 4-punktsbälte	47680 + 47684
4-punktsbälte Small	47020 + 39367(Bältesinfästning Azalea framför armstöd)
4-punktsbälte Medium	41609 + 39367(Bältesinfästning Azalea framför armstöd)
4-punktsbälte Large	41225 + 39367(Bältesinfästning Azalea framför armstöd)

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Aktivrollstol

Målgrupp

Patienten kör rullstolen själv. Erfaren rullstolsanvändare. Klarar överförflyttning till/från rullstolen självständigt. Behov av att lyfta rullstolen i/ur bil självständigt.

Användningstid

Rullstolen används kortare stunder upp till större delen av dagen

Användningsområde

Rullstolen används både inom och utomhus i olika miljöer och på varierande underlag. Tas ofta med i bil eller med färdtjänst.

Tänk på att

Vid förskrivning av aktivrollstol – kontakta hjälpmedelskonsulent för att få råd och stöd i valet av rätt aktivrollstol.

De allra mest avancerade aktivstolarna är inte med i denna upphandling utan förskrivs utanför upphandlat sortiment

Avropsordning är följande:

1 - Brukarens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning utifrån sin profession och identifierar den/de aktiva rullstolar som uppfyller brukarens behov.

Om mer än en aktiv rullstol uppfyller brukarens behov tittar förskrivaren på

2 - Handhavandet av rullstolen




Om mer än en rullstol kvarstår tittar förskrivaren på

3 - Leveranstid i förhållande till behovet.

Därefter väljs rullstol med lägst pris.

Avtalat sortiment

Panthera S3, S3 kort, Panthera S3 swing och U3, se mer information www.panthera.se

Panthera S3	 A black Panthera S3 wheelchair with a black seat and backrest, silver frame, and large rear wheels with handrims. It has a footrest and a small front castor wheel.
Panthera S3 swing	 A black Panthera S3 swing wheelchair, similar to the S3 model but with a different frame design, featuring a more pronounced front castor wheel and a different rear wheel arrangement.
Panthera U3	 A black Panthera U3 wheelchair with a black seat and backrest, silver frame, and large rear wheels with handrims. It has a footrest and a small front castor wheel.

Küschall K-serie G3, se mer information www.invacare.se

Küschall K-serie	 A black Küschall K-serie G3 wheelchair with a black seat and backrest, black frame, and large rear wheels with handrims. It has a footrest and a small front castor wheel.
------------------	---

Quickie nitrum och xenon, se mer information www.sunrisemedical.se

Quickie Nitrum	 A black Quickie Nitrum wheelchair with a black frame, black seat, and black backrest. It has large rear wheels and smaller front casters.
Quickie Xenon	 A Quickie Xenon wheelchair with a white frame, black seat, and black backrest. It has large rear wheels and smaller front casters.

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Deltagare i sortimentsgruppen (framtagande av kravspecifikation och utvärdering av inkomna anbud):

Susanne Lindersson, leg. arbetsterapeut Vimmerby kommun (Västervik, Vimmerby och Hultsfred)

Ingela Franzén, leg. arbetsterapeut Mönsterås kommun (Mönsterås, Högsby och Oskarshamn)

Anette Jönsson, leg. arbetsterapeut Kalmar kommun (Kalmar, Borgholm och Mörbylånga)

Anita Persson, leg. arbetsterapeut, Nybro kommun (Emmaboda, Torsås och Nybro)

Thomas Ekström, rekondtekniker, KHS Västervik

Tino Adén, rekondtekniker, KHS Kalmar

Anna Malmqvist, enhetschef/upphandlingsansvarig konsulent, KHS

Håkan Wendel, inköpare, KHS

Carina Ericsson, upphandlare, Upphandlingsenheten Västerviks kommun

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)